

Verglasung SLIM- Modelle

- Kunststoffgläser mit einem Index von 1.6 oder 1.67 und einer flachen Grundkurve verwenden
- Gläser auf „Null“ schleifen, mit einer 0,7mm tiefen und 0,6mm breiten Nute versehen
- Fassung leicht erwärmen, um das Material etwas geschmeidiger zu machen
- Demoscheiben von hinten nasal unten vorsichtig herauschieben (nicht drücken). Die Fassung ist mit einer Feder versehen, in die die Glasnute hineinpasst. Zur besseren Montage sind die Ecken von der Feder ausgespart
- Glas einsetzen: Fassung erwärmen, Glas von VORNE zuerst oben in die Feder einsetzen (nasal und temporal), dann VORSICHTIG den unteren Fassungsrand in die Nute „rüberknibbeln“